

Dräger Vapor 2000 und D-Vapor – Verdunster und Verdampfer für volatile Narkosemittel

Seit über 50 Jahren sind Dräger-Vapore der Maßstab in Sachen Qualität. Qualität, der Ärzte und Pflegekräfte weltweit vertrauen: Bis heute wurden über 400.000 Geräte an Krankenhäuser auf der ganzen Welt verkauft.



EINFACH MEHR FÜLLVOLUMEN: 300 ML

Das Füllvolumen der neuen Vapore 2000 und der elektronischen D-Vapore wurde auf 300 ml erhöht. So können Sie den gesamten Inhalt einer Standard-Anästhesiemittelflasche mit 250 ml Inhalt restlos in den Vapor entleeren. Selbst wenn sich im Vapor noch Restmengen Ihres Anästhesiemittels befinden, können Sie eine neue Flasche komplett hineinfüllen. Das beschleunigt nicht nur Ihren Arbeitsablauf. Da Sie die Anästhesiemittel komplett einfüllen können, müssen Sie sich auch nicht mehr darum kümmern, Restbestände sicher aufzubewahren.

FÜR ALLE STECKSYSTEME GEEIGNET

Die Vapore sind flexibel erdacht – genauso wie Ihr Dräger-Anästhesiarbeitsplatz. Zusätzlich zum Anschlusssystem DW-2000 von Dräger erhalten Sie das Anschlusssystem S-2000. Letzteres ist mit dem Selectatec-System kompatibel und besitzt die jeweiligen Interlock-Systeme für den Multi-Vapor-Betrieb. Sowohl die Vapore 2000 als auch die D-Vapore eignen sich für alle Anästhesiarbeitsplätze, die mit einem konischen 23mm ISO-Anschluss ausgestattet sind. Zudem erhöhen die Vapore die Sicherheit für Ihren Patienten – und für Sie: Das neue AutoExclusion Komfort-Stecksystem von Dräger verhindert, dass Sie zwei Anschlüsse gleich-

zeitig in Betrieb nehmen. Benutzen Sie einen Vapor, wird der zweite automatisch blockiert.

VERWECHSLUNG AUSGESCHLOSSEN

Alle Einfüllsysteme sind anästhesiemittelspezifisch gestaltet. Das heißt: Das Risiko, Anästhesiemittel zu verwechseln, wird so ausgeschlossen. Zusätzlich sind die Farben der Kappen beim Vapor 2000 und beim D-Vapor entsprechend der Farbkennzeichnung des jeweiligen Anästhesiemittels gekennzeichnet.

D-VAPOR: BATTERIEBETRIEB BEI STROMAUSFALL

In den elektronisch betriebenen D-Vapor ist zusätzlich eine Batterie eingebaut. Fällt plötzlich der Strom aus, können Sie kurzzeitige Netzausfälle überbrücken.

EINZIGARTIGE HANDRADSTELLUNG FÜR SICHEREN TRANSPORT

Selbst wenn Sie die Vapore während des Transports auf den Kopf stellen oder kippen: Die weltweit einzigartige Handradstellung der Vapor-Familie verhindert, dass das Anästhesiemittel in die Dosierelemente läuft oder in die Umgebungsluft entweicht. Nach dem Transport arbeiten die Vapore sofort gemäß ihrer jeweiligen Spezifikation weiter.



D-877-2010

Dräger Vapor 2000 - Isoflurane



D-878-2010


Dräger Vapor 2000 - Sevoflurane




D-880-2010

Dräger D-Vapor - Desflurane

D-16539-2010

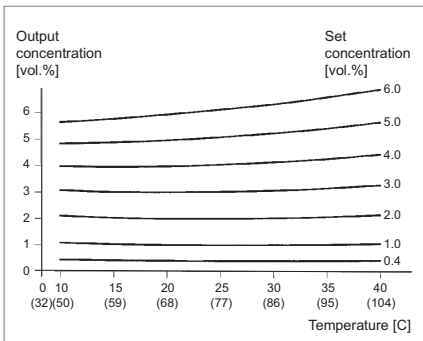

D-16540-2010

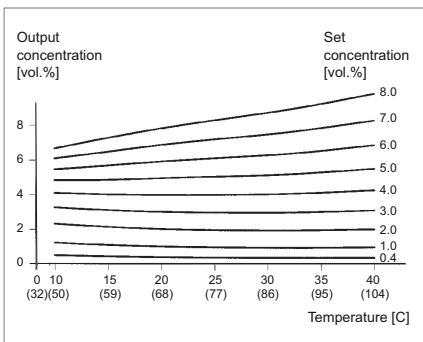

ERWEITERTER TEMPERATURBEREICH VON 10 °C BIS 40 °C

Der Temperaturbereich der Vapors wurde auf 10 °C bis 40 °C erweitert. So ist das genaue Dosieren auch bei Spezial-OPs gewährleistet, wo Hochheizen oder Kühlen eine wichtige Rolle spielt: etwa in der Kinderchirurgie, in der Herzchirurgie, bei Verbrennungen oder in der Orthopädie.

KEINE WARTUNG, KEINE REKALIBRIERUNG

Die neue Vapor-Familie hilft Ihnen Kosten und Zeit zu sparen: Die Vapors sind nicht nur komplett wartungsfrei. Während der gesamten Nutzungsdauer müssen sie auch nicht recalibriert werden.



MT-3911-2008

VOLLELEKTRONISCHE NARKOSE- MITTELDOSIERUNG FÜR DEN ZEUS IE: DIVA™

In dem Dräger-Anästhesiarbeitsplatz Zeus IE ist die vollelektronische Narkosemitteldosierung bereits integriert: als Direct Injection of Volatile Agents (DIVA). Die DIVA-Module können Sie genauso flexibel einsetzen wie die Vapors.

HAUPTSITZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebfeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Deutschland
Das Qualitätsmanagementsystem der Dräger Medical GmbH ist zertifiziert nach den Normen ISO 13485, ISO 9001 und nach Anhang II.3 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte).